

Sugerencias para la resolución de problemas

Problema	Qué hacer
El audífono no funciona	<ul style="list-style-type: none">• Limpie la abertura del altavoz o el acoplamiento• Presione la parte inferior del botón multifunción durante 3 segundos (capítulo 9).• Cargue el audífono (capítulo 4)
El audífono emite un pitido	<ul style="list-style-type: none">• Inserte el audífono correctamente (capítulo 6)• Póngase en contacto con su ORL/médico de cabecera o audioprotesista
El volumen del audífono está demasiado alto	<ul style="list-style-type: none">• Baje el volumen si el dispositivo cuenta con control de volumen (capítulo 8)
El volumen del audífono no está lo suficientemente alto o está distorsionado	<ul style="list-style-type: none">• Suba el volumen si el dispositivo cuenta con control de volumen (capítulo 8)• Cargue el audífono (capítulo 4)• Limpie la abertura del altavoz o el acoplamiento• Póngase en contacto con su audioprotesista
El audífono emite dos bips	<ul style="list-style-type: none">• Cargue el audífono (capítulo 4)
El audífono no se enciende	<ul style="list-style-type: none">• Cargue el audífono (capítulo 4)• Realice el paso 2 del proceso de reinicio (capítulo 15)
El indicador luminoso en el audífono no se enciende al colocar el audífono en los insertos de carga	<ul style="list-style-type: none">• Inserte el audífono correctamente en el cargador (capítulo 4)• Conecte el cargador a la fuente de alimentación externa (capítulo 3)• Espere tres horas después de colocar el audífono en el cargador, independientemente del comportamiento del indicador LED

Si el problema continúa, póngase en contacto con su audioprotesista para obtener ayuda.

Aplicación para controlar los audífonos

Cómo realizar la descarga:

1. Vaya al App Store® o a Google Play™
2. Busque la aplicación Easy Line Remote™
3. Descargue e instale la aplicación en su teléfono inteligente
4. Siga las instrucciones para emparejar los audífonos con el teléfono



Funcionalidades:

- Ajuste del volumen del audífono (ajuste independiente de los lados izquierdo y derecho)
- Cambio manual de programa
- Balance de volumen del dispositivo de transmisión externo
- Estadísticas de uso
- Preguntas frecuentes
- Asistencia a distancia
- Acúfenos
- Refuerzo del habla
- Control táctil
- Conexión Bluetooth



Antes de empezar a usar los audífonos

Le recomendamos encarecidamente que lea completamente las Instrucciones de uso, en especial los siguientes capítulos:

Cuidado y mantenimiento (capítulo 17)

Obtenga más información sobre sus audífonos que son resistentes al agua y al polvo en determinadas situaciones.

Resolución de problemas (capítulo 22)

Asistencia útil y posibles sugerencias en caso de que sus audífonos y no estén funcionando bien.

Información de seguridad importante (capítulo 23)

Lea la información importante para obtener el mejor rendimiento y usar el dispositivo de manera segura.

Podrá encontrar más información y asistencia, como información sobre la compatibilidad con Bluetooth, en www.KS10userportal.com



Fabricante:

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Suiza



029-0863-06/V1.02/2021-03/NLG/hc © 2021 Sonova AG. All rights reserved.

10.0T

Tcoil



KIRKLAND
Signature

Audífonos
RECARGABLES




GUÍA DE INICIO
RÁPIDO

Esta guía contiene información y consejos útiles, así como instrucciones más exhaustivas para usar los audífonos de manera óptima. Con ella no se pretende sustituir la lectura de las Instrucciones de uso que se incluyen en el kit.


Inicio rápido: introducción

1. Carga de los audífonos

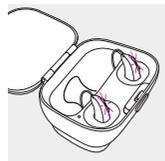


Coloque los audífonos en el estuche cargador

2. Diferenciación de los audífonos izquierdo y derecho (indicador azul para el oído izquierdo e indicador rojo para el oído derecho)

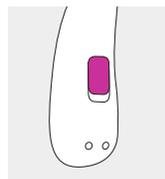

Indicador en la parte posterior del audífono

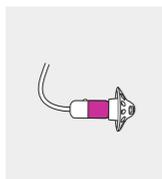


Indicador en el altavoz


3. Colocación del audífono:



Colóquese el audífono detrás de la oreja.

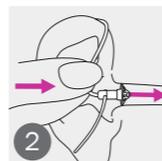


Introduzca el acoplamiento en el conducto auditivo.

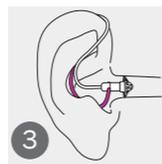


Si el acoplamiento tiene una retención conectada, insértela en el pabellón auditivo para asegurar el audífono.

4. Uso del audífono

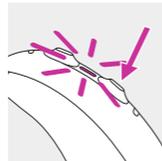

Botón multifunción

1. Conmutador encendido/apagado
2. Control de volumen
3. Cambio de programa

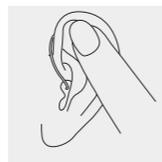

Control táctil: toque para

1. Aceptar/finalizar llamadas telefónicas
2. Pausar/reanudar la transmisión
3. Iniciar/detener el asistente de voz


Disfrute de una conectividad fácil a todos los teléfonos compatibles con Bluetooth® para llamadas telefónicas con manos libres, transmisión de música, libros electrónicos, etc.

Paso 1: Emparejamiento inicial



A. En el dispositivo (p. ej., un teléfono), asegúrese de que la tecnología inalámbrica Bluetooth esté activada y busque los dispositivos con Bluetooth en el menú de ajuste de conectividad.

B. Encienda ambos audífonos. Ahora tiene 3 minutos para emparejar los audífonos con el dispositivo.

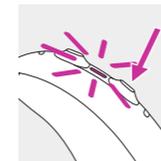

C. El dispositivo muestra una lista de dispositivos compatibles con Bluetooth. Seleccione el audífono en la lista para emparejar simultáneamente ambos audífonos. Un bip confirma que el emparejamiento se realizó correctamente.

Los audífonos pueden conectarse a teléfonos inteligentes iPhone® y Android™.

Una vez que haya emparejado los audífonos con el dispositivo, estos volverán a conectarse automáticamente cuando los encienda.

Para obtener más información sobre las instrucciones de emparejamiento, visite www.KS10userportal.com o consulte el capítulo 12 de las Instrucciones de uso.

La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. El logotipo de Apple y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

Paso 2: Cómo realizar llamadas telefónicas de manos libres

Realizar una llamada: Introduzca el número de teléfono y pulse el botón de marcado. Oirá el tono de marcado a través de los audífonos. Los audífonos captan su voz a través de los micrófonos.



Aceptar una llamada:

Pulsar la parte superior de la oreja dos veces o pulsar brevemente la parte superior o inferior del botón multifunción del audífono (menos de 2 segundos) o directamente en el teléfono.



Finalizar y rechazar una llamada:

Pulsar la parte superior de la oreja dos veces o una pulsación larga en la parte superior o inferior del botón multifunción del audífono (más de 2 segundos) o directamente en el teléfono.