





## Comment appairer vos aides auditives Kirkland Signature 10.0 avec bobine-t avec votre téléphone mobile.


1. Téléchargez et installez l'application Easy Line Remote™ à partir de Google Play™ ou de l'App Store®

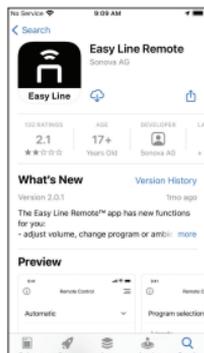

2. Ouvrez l'application et redémarrez vos aides auditives

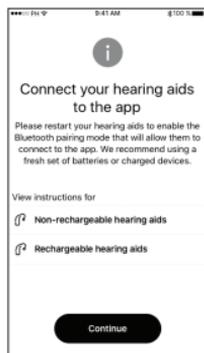


3. Sélectionnez vos aides auditives

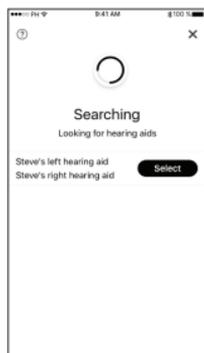

4. Contactez le personnel du centre auditif (HACS) et prévoyez un horaire pour un rendez-vous avec Remote Support

# Comment lancer une session Remote Support

- 5 Pour démarrer Remote Support, appuyez sur les 3 lignes situées en haut à droite

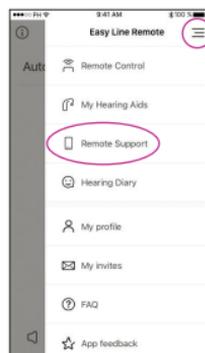

- 6 Appuyez sur « Remote Support »

- 7 Appuyez sur « Start » (Démarrer) pour commencer la recherche du personnel du centre auditif (HACS)

*REMARQUE : vous devez d'abord avoir prévu une heure de rendez-vous avec votre audioprothésiste. Il ne sera disponible que si vous avez déjà programmé un rendez-vous convenu. Veuillez patienter le temps que votre audioprothésiste se connecte.*



- 8 Conversation vidéo avec le personnel de votre centre d'aides auditives (HACS)

